

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922) 49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Ижевск (3412)26-03-58
Иваново (4932)77-34-06
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Россия (495)268-04-70

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сыктывкар (8212)25-95-17
Сургут (3462)77-98-35
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Казахстан (772)734-952-31

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

<https://deka.nt-rt.ru> || dak@nt-rt.ru

Фракционный лазер CO2 SMARTXIDE DOT2



ПРИМЕНЕНИЕ

Омоложение кожи

Удаление пигментных пятен

Коррекция растяжек и стрий

Коррекция рубцов

Лазерная псевдоблефаропластика

Улучшение тонуса и текстуры кожи

Удаление морщин

Удаление новообразований

ТИП ИЗЛУЧЕНИЯ

- CO₂ - 10600 нм; Diode CW/PW - 980 нм; Radio Frequency



CO₂+RF (РАДИОЧАСТОТА)

SmartXide технология Touch многофункциональная инновационная лазерная система, не имеющая аналогов на рынке аппаратной косметологии, сочетает в себе комбинированное воздействие двух энергий CO₂ лазерного излучения и RF электромагнитного поля, для достижения эффективных результатов в эстетической медицине.

ТЕХНОЛОГИЯ PSD®

Эксклюзивная запатентованная технология выбора формы импульса (Pulse Shape Design) обеспечивает лазеру широчайшие возможности в дерматологии и косметологии. Управление формой импульса позволяет наилучшим образом выполнять модуляцию эффекта абляции и тепловой стимуляции в соответствии с задачами врача и потребностями пациента. Специфические особенности каждой формы импульса позволяют выполнять процедуры с минимальной инвазивностью, более быстрым периодом реабилитации (чем при других лазерах) и отличными результатами.

SmartXide 2 технология Touch позволяет полностью контролировать длительность импульса, пиковую мощность и форму каждого импульса:

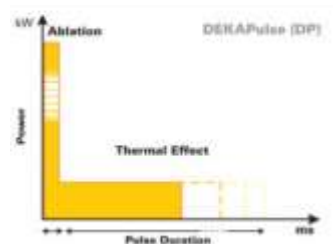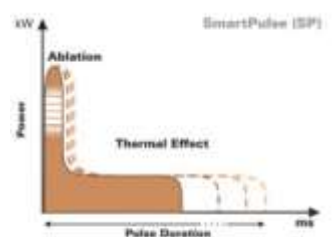


SmartPulse (SP) состоит из двух частей: короткой по времени фазы абляции и продолжительной фазы прогрева (стимуляции) SP наиболее эффективен при работе с тонкой кожей для ее уплотнения, с атрофическими рубцами, (в т.ч постакне), при необходимости более поверхностной стимуляции (например, мелкоморщинистый тип старения).

DekaPulse (DP) - абляция до ретикулярного слоя дермы с воронкообразной формой кратера абляции. DP важен, когда необходимо прогреть самые глубокие слои кожи (сетчатый слой дермы), но выпарить только тонкий ороговевший слой, таких деликатных зон как шея, декольте, кисти рук, периорбитальная область.



Абляция


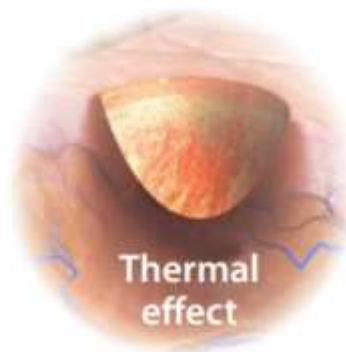


Термальный эффект

РЕЖИМ SMARTSTACK

Еще больше возможностей по управлению параметрами мощности и прогрева дает технология SmartStack®

Для более целенаправленного лазерного воздействия инженерами DEKA также был изобретен специальный режим SmartStack®, позволяющий направлять лазерный импульс до 5 раз строго в одну точку воздействия.

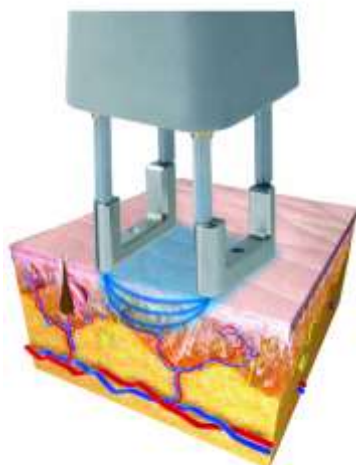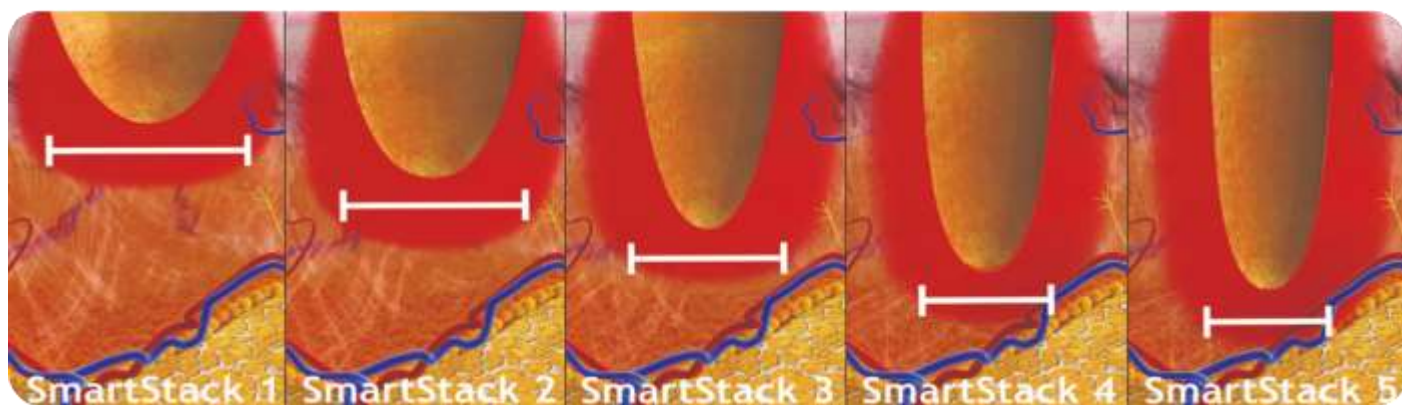

RF (РАДИОЧАСТОТА): ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛАЗЕРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

Сканер HiScan DOT/RF используется как для фракционной CO₂ лазерной технологии так и для биполярного радиочастотного излучения, создавая избирательный нагрев для глубокого локализованного действия в коже. Комбинированное и одномоментное действие RF волны и CO₂ лазера и позволяет сократить время восстановления и ускоряет регенерацию кожной ткани.

Технология SmartXide2 DROT - это точный выбор всех рабочих параметров, модулирующих тип лечения в соответствии с индивидуальными особенностями пациента и выбранных обрабатываемых целевых тканей. Система SmartXide2 DROT идеальна для проведения процедур на нежных участках кожи, таких как шея и область декольте, а также предназначена для малоинвазивного лифтинга зоны вокруг глаз (лазерная псевдо-блефаропластика).

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ: ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ СКАНЕРА V2LR ДЛЯ ГИНЕКОЛОГИИ

HiScan V2LR - инновационная система сканирования, специально разработанная для вульво-вагинального лазерного воздействия по методике MonaLisaTouch®.

Технология MonaLisaTouch® – инновационная лазерная методика коррекции инволютивных изменений женских половых органов, реализована в лазерной системе SmartXide. Специально разработанная для работы по слизистой влагалища, уникальная форма импульса D-Pulse состоит из 2 независимых регулируемых фаз воздействия: абляции и термической стимуляции. Лазерный микрочувствительный сканирующий фракционный режим воздействует на слизистую влагалища и вульву, вызывая комплексный эффект: аблативный, термический и биостимулирующий. Сканер обеспечивает лазерное воздействие на стенки влагалища, а эксклюзивный режим DEKA Pulse минимально испаряет эпителий, стимулируя процессы митотической активности клеток, самовосстановление эпителия, с восстановлением функций эпителиальной ткани, за счет процессов неокотеллагенеза и ангиогенеза в слизистой влагалища.

ПРОЦЕДУРА ЗАНИМАЕТ всего несколько минут и может быть проведена в кабинете врача, без необходимости анестезии и госпитализации пациента.

КУРС составляет от 2 до 4 процедур, с перерывом в 1.5 месяца.



ДРУГИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

SmartTrack

Эксклюзивный алгоритм рандомизированного фракционного сканирования для минимизации локальной гипертермии

База данных

Интегрированные протоколы, разработанные для эстетической дерматологии и других областей применения (таких как вагинальное ремоделирование и гинекология)

HiScan DOT/RF

Первая фракционная сканирующая система, которая объединяет CO₂ лазер и радиочастотный источник

Удобная мультимедиа

Интегрированные протоколы работ, а также фото- и видео база данных способствует легкому обучению

5 фигур

Возможность задавать параметры сканирования, регулируя размер и соотношение высота/ширина

Более 2,000,000

ПОЧЕМУ SMARTXIDE DOT2®?



УНИКАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Технологии SmartStack, SmartPulse и сканер HiScan Dot только в лазерах SmartXide



НОВУ-ХАУ В РАБОТЕ ВРАЧА

Мультимедийный контент с фотографиями и видео обеспечивает быстрое и эффективное обучение специалистов



СОЧЕТАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Возможность сочетать CO2 и RF объединённых в сканере HiScan предлагает врачам широкий спектр применений

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922) 49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Ижевск (3412)26-03-58
Иваново (4932)77-34-06
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Россия (495)268-04-70

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сыктывкар (8212)25-95-17
Сургут (3462)77-98-35
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Казахстан (772)734-952-31

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93