

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922) 49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Ижевск (3412)26-03-58
Иваново (4932)77-34-06
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Россия (495)268-04-70

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сыктывкар (8212)25-95-17
Сургут (3462)77-98-35
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Казахстан (772)734-952-31

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

<https://deka.nt-rt.ru> || dak@nt-rt.ru

Фракционный лазер CO2 SMARTXIDE TOUCH



ПРИМЕНЕНИЕ

Омоложение кожи

Удаление пигментных пятен

Коррекция растяжек и стрий

Коррекция рубцов

Лазерная псевдоблефаропластика

Улучшение тонуса и текстуры кожи

Удаление морщин

Удаление новообразований

ТИП ИЗЛУЧЕНИЯ

- CO₂ - 10600 нм; Radio Frequency




CO₂+RF (РАДИОЧАСТОТА)

SmartXide Touch представляет фракционный CO₂-лазер HI-END класса! Многофункциональная инновационная лазерная система, состоящая из двух источников: CO₂-лазера и RF-частоты. Можно работать как на полноценном CO₂-лазере, так и в сочетанном применении CO₂+RF, что значительно расширяет возможности работы врача.

ТЕХНОЛОГИЯ PSD®

Эксклюзивная запатентованная технология выбора формы импульса (Pulse Shape Design) обеспечивает лазеру широчайшие возможности в дерматологии, косметологии и гинекологии. Управление формой импульса позволяет наилучшим образом выполнять модуляцию эффекта абляции и тепловой стимуляции в соответствии с задачами врача и потребностями пациента. Специфические особенности каждой формы импульса позволяют выполнять процедуры с минимальным повреждением кожи, более быстрым периодом реабилитации (чем при других лазерах) и отличными результатами.

SmartXide Touch позволяет полностью контролировать длительность импульса, пиковую мощность и форму каждого импульса:

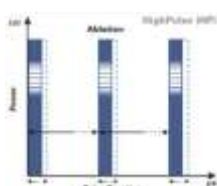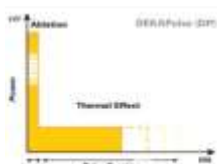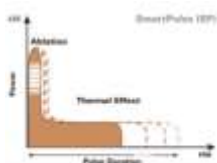

SmartPulse (SP) состоит из двух частей: короткой по времени фазы абляции и продолжительной фазы прогрева (стимуляции). SP наиболее эффективен при работе с тонкой кожей для ее уплотнения, с

атрофическими рубцами, (в т.ч. постакне), при необходимости более поверхностной стимуляции (например, мелкоморщинистый тип старения).

DekaPulse (DP) - абляция до ретикулярного слоя дермы с воронкообразной формой кратера абляции. DP важен, когда необходимо прогреть самые глубокие слои кожи (сетчатый слой дермы), но выпарить только тонкий ороговевший слой, таких деликатных зон как шея, декольте, кисти рук, периорбитальная область.


HighPulse (HP) импульс формируется постоянным высоким пиковым импульсом без тепловой части. HP очень важен, когда необходимо выпарить слой мягких тканей без прогрева. HP идеален для поверхностного лазерного пилинга, при работе с расширенными порами, для выпаривания доброкачественных пигментных образований, для работы с гипертрофическими рубцами.



РЕЖИМ SMARTSTACK

Еще больше возможностей по управлению параметрами мощности и прогрева дает технология SmartStack®

Для более целенаправленного лазерного воздействия инженерами DEKA также был изобретен специальный режим SmartStack®, позволяющий направлять лазерный импульс до 5 раз строго в одну точку воздействия.

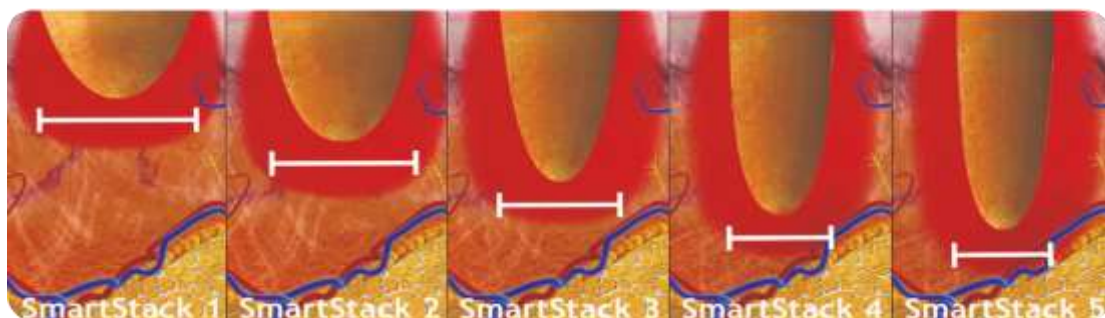



НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ: ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ СКАНЕРА V2LR ДЛЯ ГИНЕКОЛОГИИ

HiScan V2LR - инновационная система сканирования, специально разработанная для вульво-вагинального лазерного воздействия по методике MonaLisaTouch®.

Технология MonaLisaTouch® – инновационная лазерная методика коррекции инволютивных изменений женских половых органов, реализована в лазерной системе SmartXide. Специально разработанная для работы по слизистой влагалища, уникальная форма импульса D-Pulse состоит из 2 независимых регулируемых фаз воздействия: абляции и термической стимуляции. Лазерный микрочувствительный сканирующий фракционный режим воздействует на слизистую влагалища и вульву, вызывая комплексный эффект: аблативный, термический и биостимулирующий. Сканер обеспечивает лазерное воздействие на стенки влагалища, а эксклюзивный режим DEKA Pulse минимально испаряет эпителий, стимулируя процессы митотической активности клеток, самовосстановление эпителия, с восстановлением функций эпителиальной ткани, за счет процессов неокотеллагенеза и ангиогенеза в слизистой влагалища.

ПРОЦЕДУРА ЗАНИМАЕТ всего несколько минут и может быть проведена в кабинете врача, без необходимости анестезии и госпитализации пациента.

КУРС составляет от 2 до 4 процедур, с перерывом в 1.5 месяца.

ДРУГИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

SmartTrack

Эксклюзивный алгоритм рандомизированного фракционного сканирования для минимизации локальной гипертермии

HiScan DOT/RF

Первая фракционная сканирующая система, которая объединяет CO2 лазер и радиочастотный источник

5 фигур

Возможность задавать параметры сканирования, регулируя размер и соотношение высота/ширина

База данных

Интегрированные протоколы, разработанные для эстетической дерматологии и других областей применения (таких как вагинальное ремоделирование и гинекология)

Удобная мультимедиа

Интегрированные протоколы работ, а также фото- и видео база данных способствует легкому обучению

Более 2,000,000

Разных конфигураций для различных процедур



ПОЧЕМУ SmartXide Touch?



УНИКАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Технологии SmartStack, SmartPulse и сканер HiScan Dot только в лазерах SmartXide



ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Работа в движении позволяет обработать большую площадь за несколько минут



СОЧЕТАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Возможность сочетать CO2 и RF объединённых в сканере HiScan предлагает врачам широкий спектр применений

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922) 49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Ижевск (3412)26-03-58
Иваново (4932)77-34-06
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Россия (495)268-04-70

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сыктывкар (8212)25-95-17
Сургут (3462)77-98-35
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Казахстан (772)734-952-31

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

<https://deka.nt-rt.ru> || dak@nt-rt.ru